

OCCLEAN SPRAY

MANUAL



1. 소개

본 제품은 교합 상태를 알아볼 때 사용

2. 사용 시 준비사항

1. 경고

- 1) 치과의사나 기공사 등 숙련된 전문가가 사용해야 한다.
- 2) 작업 시 눈과 피부 등의 보호를 위해 보안경, 앞치마, 장갑 방진 마스크를 준비한다.
- 3) 화기 옆에 제품을 놓지 않는다.
- 4) 제품을 정해진 용도 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
- 5) 작업장은 환기 시설을 구비한다.
- 6) 눈에 들어가거나 피부에 접촉하면 물로 깨끗이 씻고 필요 시 의사의 처방을 따른다.
- 7) 마시거나 흡입했을 때는 신선한 공기로 숨을 쉬게 하고 증세가 나타나면 의사의 처방을 따른다.

3. 사용방법

1. 사용 전 준비사항

- 1) 치과 의사나 기공사와 같은 치과 전문가만 사용한다.
- 2) 제조자의 사용설명서를 숙지한 후 사용방법을 준수한다.

2. 사용 방법

- 1) 교합을 체크하고자 하는 인공 치아나 모델을 준비한다.
- 2) 스프레이 전에 충분히 흔들어서 사용한다.
- 3) 3 ~ 5 cm 정도의 거리를 두고 조심스럽게 스프레이 한다.
- 4) 교합 확인이 끝나면 브러시나 스팀크리너로 깨끗이 씻는다.
- 5) 미세 부위를 확인하고자 할 때는 부착된 튜브의 노즐을 끼워서 사용한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리 방법

- 1) 실온 상태에서 보관한다.

(주)하이덴탈코리아

주소 : 서울시 영등포구 경인로 775, 에이스하이테크시티 2-207

Tel : 02-779-8597 Fax : 02-778-7459