


Smile Line ☺

FLEXMOUNT

MANUAL

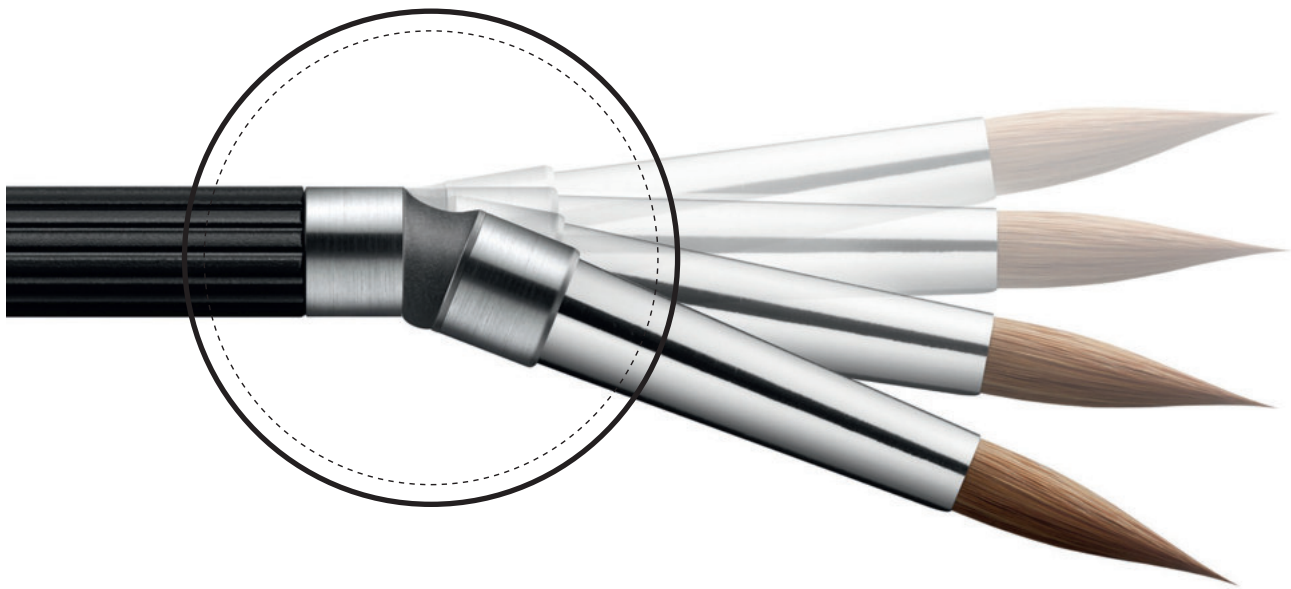

**HIGH
DENTAL**
KOREA

1. 소개

인스트루먼트 핸들과 팁을 결합하는 유연한 성질의 러버 커넥터로 Smile Line 브러시나 지르코니아 믹싱 스파츨라에 사용할 수 있다.

1. 지르코니아 스파츨라와 결합 시



사용 시 쉽게 부러지는 천성을 지닌 지르코니아 스파츨라와 결합하면 [FlexMount]가 충격 흡수체로 작용하여 포세린이나 스테인 믹싱 시 최대의 작업 편의성을 제공한다.



2. 포세린 빌드업 브러쉬와 결합 시

브러쉬 팁에 매우 미세한 스냅을 이용할 수 있다.

- 사용 방법 1 : 파우더가 정확하고 안정감 있게 포지셔닝 되게 하기 위해 알맞은 양의 수분을 브러시 팁에 묻힌다. 부드럽게 스냅을 주면 브러시의 볼록한 부분에서 팁까지 수분이 빠르게 흡수된다.

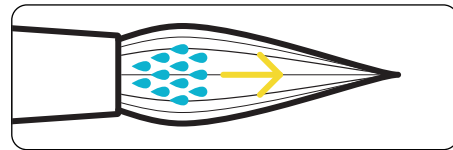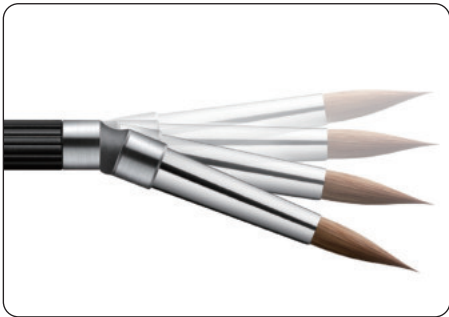

- 사용 방법 2 : 파우더를 올리기 전에 약간의 스냅을 주어 팁의 헤어가 다시 깨끗하게 돌아올 수 있도록 한다.

3. 사용 시 주의 사항

브러시를 물컵 밖에서 바로 [스냅]하지 않는다. 작업 공간에 물이 튀고 브러시 팁의 수분 상태를 최고조로 조절하기 어렵게 할 수 있다. H2O 스폰지에 브러시를 먼저 [STOP] 후 다음 작업을 한다.



빌드업 도중에 파우더를 두 번 찍는 중간에 살짝 스냅한다. 팁이 가장 이상적인 수분 상태를 유지하게 해준다.

- FlexMount]는 다음의 제품과 호환된다.
 - Smile Line's ZR spatula
 - Smile Line's Kolinsky brush tips #8-R, #8-LT, #6
 - Smile Line's N.era 8 brush tip



4. 제조사 정보

SmileLine SA (스위스)

(주)하이덴탈코리아
 주소 : 서울시 영등포구 경인로 775, 에이스하이테크시티 2-207
 Tel : 02-779-8597 Fax : 02-778-7459