

# Platinum 95

## MANUAL




**고정밀 기공용 부가중합실리콘 (폴리비닐실록산)  
Platinum 95 - 1:1 혼합으로 매우 단단한 세팅 (95 Shore-A)**

**적 용 :**

- 임시 보철물 제작에 사용
- 메탈 프레임이나 풀 덴처 일부를 추가 및 교체할 때 사용
- 가철성 치은 마스크 (Gingifast) 제작에 사용
- 파살이나 풀덴처용 플라스크의 파살 카운터 다이 제작에 사용
- 덴처 수리 시 블록 작업에 사용
- 풀덴처와 석고 모델의 복제 시 사용
- 광중합 콤포지트 레진 작업 시 서포트 역할

**사용 방법 :**

- 제공된 계량 스푼(1)을 사용하여 두 가지 재료를 동일하게 떠올린다. 계량 스푼을 바꾸지 않는다.
- 혼합 / 사용 : 베이스와 카탈리스트를 층이 생기지 않고 칼라가 균일하게 섞일 때까지 약 30초간 섞는다(2). 그리고 퍼티로 모델 작업을 시작한다. 혼합 단계를 포함하여, 작업 시간은 약 2분이다. 그 다음 보철물을 제거한다. (4)

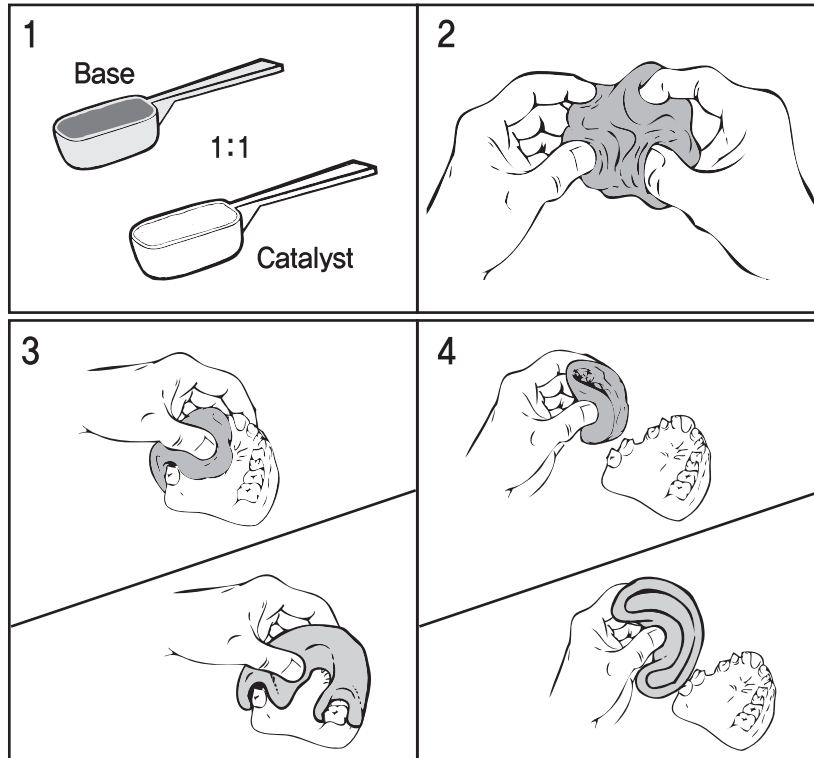

**사용 시 주의 사항 :**

- 1:1 비율은 제품의 특성을 유지하고 올바른 작업 시간을 달성하기 위해 엄격하게 준수한다.
- 카탈리스트를 더 넣어도 세팅 시간은 줄어들지 않는다.
- 사용 후에는 바로 용기 뚜껑을 닫는다. 두 재료의 계량 스푼이나 뚜껑이 바뀌지 않도록 주의한다.
- A-실리콘 세팅 시 라텍스 글러브를 사용하지 않는다.  
실리콘과 닿는 표면이 깨끗하고 건조하게 유지되기 위해 비닐 장갑을 사용하고 손을 깨끗이 씻는다.
- 5 ~ 27 °C에서 보관 시 유효기간은 24개월이다.

기술 데이터	Platinum 95
혼합 시간	30 초
작업 시간*	2 분
세팅 시간*	8 분
제거 시간**	6 분
경도 shore-A (최대)	95

\* 상기 시간은 23°C에서 혼합 단계의 시작부터 의미한다.

\*\* 상기 시간은 실온 및 혼합 테크닉에 따라 달라질 수 있다.

(주)하이덴탈코리아

주소 : 서울시 영등포구 경인로 775, 에이스하이테크시티 2-207

Tel : 02-779-8597 Fax : 02-778-7459