

TWİNY HEATING UNIT

MANUAL



1. 개요

본 제품은 치과 기공소에서 치과 보철물을 제작할 때 사용하는 수지 계통의 수복재료의 광중합후, 최종 중합을 하기 위해 사용한다.

2. 사용목적

수지 계통의 수복 재료, 전색제 등을 중합하는 열 중합기로 최종 강도를 얻을 목적으로 한다.

3. 사용 시 주의 사항

1. 치과 전문가만 사용한다. 어린이의 손이 닿지 않도록 한다.
2. 사용하지 않는 경우 전원 코드를 뽑아 놓는다.

4. 사용 방법

1. 장비의 뚜껑을 열고 챔버에 구슬을 반쯤 채운다.

주 의:

이때 물은 절대 넣지 않는다.

2. 뚜껑을 덮고 장비의 오른쪽 하단에 있는 버튼을 ON으로 놓는다.
3. 약 10 ~ 15분 후 디지털 화면에 약 110°C도 이상의 온도가 되었다가 일정한 지점에서 상승을 멈춘다.
4. 작업한 레진 모델 (예: 인레이)을 뚜껑을 열고 구슬 위에 올려놓고 뚜껑을 닫는다.
5. 왼쪽 하단의 버튼을 누르면 온도가 약 110°C 온도에서 15분간 자동으로 열중합을 시작하고 유리 구슬이 작업물에 열을 균일하게 전달해준다.
6. 약 15분이 경과하면 중합기에서 신호음이 들리고 온도가 하강을 시작한다. 이때 왼쪽 하단 버튼을 누르면 신호음이 꺼진다. 이후 작업물을 빼낸다.

5. 전기적 특성

1. 정격전압 : AC 230±10%
2. 정격주파수 : 60 Hz
3. 소비 전력 : 330W
4. 무게 : 1.5 Kg

(주)하이덴탈코리아

주소 : 서울시 영등포구 경인로 775, 에이스하이테크시티 2-207

Tel : 02-779-8597 Fax : 02-778-7459